

 <b>ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ</b>	<b>DOKÜMAN KODU:</b>	EN.TL.03
	<b>YAYIN TARİHİ:</b>	MART 2010
	<b>REVİZYON NO:</b>	01
	<b>REVİZYON TARİHİ:</b>	HAZİRAN 2018
	<b>SAYFA NO:</b>	1 / 1
<b>VENTİLATÖR BAKIM TALİMATI</b>		

**1. AMAÇ:** Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yoğun bakım üniteleri ile kliniklerinde kullanılan ventilatörlerin temizlik ve dezenfeksiyonunu sağlamaktır.

**2. KAPSAM:** Bu talimat Tüm Yoğun Bakım Üniteleri ve Klinikleri kapsar.

**3. KISALTMALAR:**

**4. TANIMLAR:**

**5. SORUMLULAR:** Yoğun Bakım Ünitesi Hemşireleri, Klinik Hemşireleri

**6. FAALİYET AKIŞI:**

**6.1.** Kullanılan ventilatör devresi ve bağlantı hortumları tek kullanımlık ve steril olmalıdır. Kullanıldıktan sonra tıbbi atık poşetine atılmalıdır.

**6.2.** Kullanılan ventilatör bakteri filtresi tek kullanımlık olmalı ve kullanıldıktan sonra tıbbi atık poşetine atılmalıdır.

**6.3.** Cihazın nemlendirici bölümünde kullanılan su, steril distile su olmalıdır.

**6.4.** Cihazın dış yüzeyi mekanik temizlik sonrasında uygun dezenfektan ile günlük, kirlendikçe ve hasta için kullanımı bittikten sonra silinmelidir.

**6.5.** Ventilatörlerin üretici firma önerileri de dikkate alınarak rutin bakımları yaptırılmalıdır.

**7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:**

7.1. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri “Enfeksiyon Kontrol Programı Kitabı”

7.2. Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği

7.3. Sağlıkta Kalite Standartları

7.4. Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

**HAZIRLAYAN:**  
**ENFEKSİYON KONTROL**  
**KURULU**

**KONTROL EDEN:**  
**KALİTE YÖNETİM**  
**DİREKTÖRÜ**

**ONAYLAYAN:**  
**BAŞHEKİM**