

 ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ	DOKÜMAN KODU:	EN.TL.02
	YAYIN TARİHİ:	MART 2010
	REVİZYON NO:	01
	REVİZYON TARİHİ:	HAZİRAN 2018
	SAYFA NO:	1 / 2
KÜVEZ BAKIM TALİMATI		

1. AMAÇ: Erciyes Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi yenidoğan kliniği ve küvez bulunan diğer kliniklerde kullanılan küvezlerin enfeksiyonlara karşı korunmasını ve temizliğini sağlamaktır.

2. KAPSAM: Bu talimat Yenidoğan Kliniğini ve Küvez kullanan Klinikleri kapsar.

3. KISALTMALAR:

4. TANIMLAR:

5. SORUMLULAR: Yenidoğan Klinik ve Küvez Kullanan Klinik Hemşireleri.

6. FAALİYET AKIŞI:

- Küvözlerin temizliğinde tek kullanımlık bez kullanılmalıdır.
- Bebek çıktıktan sonra küvöz dezenfekte edilerek kullanılmalı. Uzun süre yatan bebeklerde haftada bir, 1 (bir) kilogramdan küçük bebeklerde ise 5 (beş) günde bir dezenfekte edilmelidir.
- Temizlik günlük olarak ve ayrıca görünür kirlenme olduğunda da bekletilmeden hemen silinir.
- Küvez boşaltılır. Bebek varsa temiz bir küveze alınır. Mekanik temizlik (su ve sabun)veya üretici firma önerisi doğrultusunda yapılır.
- Küvezin fişi prizden çıkartılır.
- Bütün küvez parçaları ayrılır.
- Su haznesinde su varsa boşaltılır.
- Bütün parçalar hazırlanan mekanik temizlik solüsyonu ile silinir.
- Dezenfektan sıkılır. Üretici firmanın önerdiği süre kadar beklendikten sonra silinir.
- Ayrılabilir parçalar üretici firmanın önerilerine göre dezenfeksiyon/sterilizasyon işlemi sağlanır.
- Küvözlerin nemlendirici kapları, haftada bir ve bebek değişiminde steril edilmeli, steril su ile doldurulmalıdır. Üzerine ekleme yapılmamalıdır. Kullanılmadığında bu kaplar dezenfekte edilerek kuru halde saklanmalıdır.
- Küvez parçaları sırayla yerleştirilir.
- Bütün parçalar yerleştirildikten sonra küvez dezenfektanıyla bir kez daha silinir.
- Üretici firmanın önerdiği süre kadar havalandırılır.
- Küvöz dezenfeksiyonu dışında fan ve filtre sistemlerinin bakımı ve değişimi, üretici firma önerilerine göre yapılmalıdır.

7. İLGİLİ DOKÜMANLAR:

- Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri “Enfeksiyon Kontrol Programı Kitabı”
- Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği
- Sağlıkta Kalite Standartları
- Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik

HAZIRLAYAN: ENFEKSİYON KONTROL KURULU	KONTROL EDEN: KALİTE YÖNETİM DİREKTÖRÜ	ONAYLAYAN: BAŞHEKİM
--	---	--------------------------------------